




**EAC**



# **МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ**

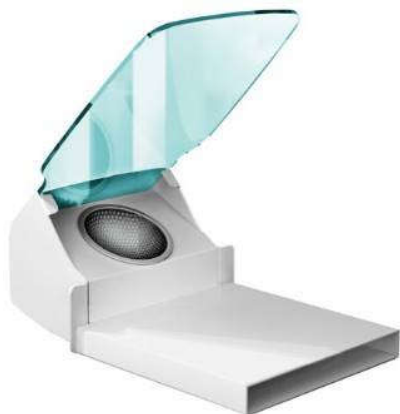

**Этикетка  
АВЕ 537.300.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-RU.AУ04.В.21671 от 16.07.2015

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Модуль вытяжной универсальный серии ВМУ, (далее – ВМУ). ТУ 4863-047-52331864-2015.

1.2 ВМУ предназначен для комплектования столов СЗТ 4.3 МАСТЕР/МИНИ (далее – СЗТ), при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более .....80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- диаметр подсоединяемого шланга ..... 45 мм
- масса, не более ..... 1,0 кг
- габариты, без экрана, не более ..... 160×245×115 мм

### 1.5 Особенности

- Подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»,\* далее - УПЗ.
- Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
1 – Корпус	- 1
2 – Экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ	- 1
3 – Съёмный фильтр-сито	- 1
Втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ	- 1
Этикетка АВЕ 537.300.000ЭТ	

☒ - Поставка по дополнительной заявке  
Экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ



Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.


### 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить ВМУ в СЗТ вместо фиангеля.

Установить экран (2) в паз на корпусе ВМУ, предварительно сняв с него защитную пленку. Ограничители на экране не позволяют ему смещаться вправо-влево.

Установить в отверстие вытяжного канала СЗТ резиновую втулку.

Подсоединить входной шланг УПЗ к втулке.

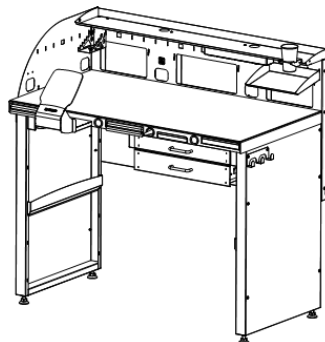

### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистка воздушных каналов ВМУ от производственных отходов с использованием УПЗ;
- протирка внутренних, наружных поверхностей и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

### 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**Адрес Изготовителя:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>ВМУ</b>	<b>2.0 НЬЮ</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.