




БОКС для выполнения работ по очистке изделий паром Б 1.0 СТИМ

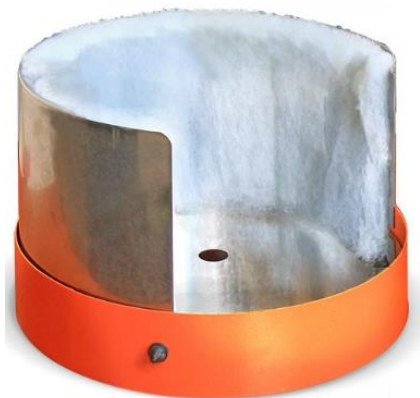

**Этикетка
АВЕ 318.000.000 ЭТ**

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для бокса **Б 1.0 СТИМ** (далее – **БОКС**).

1.2 **БОКС** предназначен для организации мобильного рабочего места по очистке паром. Эксплуатируется совместно с пароструйным устройством (далее - УПС). Рекомендуются УПС ГЕЙЗЕР.

1.3 **БОКС** обеспечивает комфортное выполнение работ, а также сбор конденсата и отходов при очистке паром. Легко обслуживается.

1.4 Основные технические характеристики

- габариты, не более 265×265×180 мм
- масса, не более 1,9 кг

1.5 Комплектность

- | | |
|------------------------------------|------|
| | шт |
| 1 – Рабочий столик..... | – 1 |
| 2 – Емкость для сбора отходов..... | – 1 |
| 3 – Экран защитный | – 1 |
| Салфетка сменная | – 5 |
| Зажим для салфетки..... | – 10 |
| Этикетка АВЕ 318.000.000 ЭТ | |

Поставка по дополнительной заявке:

- материал для сменных салфеток ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН

2 РАБОТА

2.1 Установить экран (3) на емкость (2) до упора.

2.2 . Установить столик (1) на упоры емкости (2).

2.3 Для блокировки разбрызгивания грязи закрепить салфетку при помощи зажимов.

2.4 Разместить предметы для очистки (изделия, инструменты и т.д.) на столик.

2.5 Провести очистку паром согласно эксплуатационной документации на УПС.

2.6 По окончании работ очистить **БОКС**, для чего снять столик, используя, при необходимости, отверстие и слить конденсат с отходами из емкости.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, заменить салфетку, протереть поверхности корпуса:

- наружные от пыли - влажной мягкой тканью;
- внутренние - тканью, смоченной бензином “Галоша”.

При стойких загрязнениях – обработать **БОКС** паром.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Средний срок службы - 5 лет. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

