



**EAЭС**



**Лампа  
для сушки  
окрашиваемых изделий  
из оксида циркония  
ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН**

Декларация о соответствии  
EAЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.04188/20  
от 11.02.2020

**Этикетка  
АВЕ 638.000.000 ЭТ**

для CAD-CAM систем

**Мобильное Приложение АВЕРОН:**

**для Android**



**для IOS**



**для Huawei**



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН** (далее - ЛАМПА) серии ЛАМПА ЦИРКОН, предназначена для сушки окрашиваемых изделий из оксида циркония. ТУ 27.90.11-069-52331864-2020.

Предназначена для совместной работы с ЭМП 1.0 ЦИРКОН.

### 1.2 Особенности

- инфракрасная лампа **(1)** мощностью 250 Вт (далее ИК-лампа) с выключателем **(2)**;
- регулировка положения ИК-лампы по высоте, в диапазоне 60...110 мм от основания до колбы.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура.....10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- электропитание.....~220В 50Гц 1,2А
- мощность ИК-лампы..... 250 Вт
- габариты (ШхГхВ), не более..... 150×195×330 мм
- масса, не более.....2,5 кг

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН 1 шт.

Этикетка АВЕ 638.000.000 ЭТ 1 шт.

### Поставка по дополнительной заявке

Сменная инфракрасная лампа ЛС 1.0 ЦИРКОН.



## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Перед началом эксплуатации отрегулировать лампу на высоту примерно 90 мм от основания, ослабив барашек **(3)** на задней стенке ЛАМПЫ. Переместить ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек.

ИК-лампу голыми руками не трогать во избежание преждевременного выхода её из строя, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.

- Промыть изделие под проточной водой для удаления пыли и поместить под ИК-лампу.
- Включить ЛАМПУ выключателем **(2)**. Просушить изделие не менее 20 мин.
- Высушенное изделие можно подвергать покраске (см. инструкцию на краситель).
- Окрашенное изделие поместить под ИК-лампу. Просушить до полного высыхания, но не менее 20 мин.



## **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техобслуживание проводить после отключения ЛАМПЫ от сети.

Замена ИК-лампы:

- ослабить барашек на задней стенке и опустить ИК-лампу в нижнее положение;
- выкрутить ИК-лампу из патрона против часовой стрелки;
- закрутить новую ИК-лампу в патрон. Здесь и далее ИК-лампу голыми руками не трогать, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.
- поднять ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек на задней стенке.

## **6 УТИЛИЗАЦИЯ**

В составе ЛАМПЫ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛАМПЫ не требуется.

## **7 ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска Изготовителем, кроме инфракрасной лампы.

Гарантийный срок на ИК-лампу - 6 месяцев с даты продажи.

Установленный Изготовителем срок службы ИК-лампы - 6500 часов.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:  
<https://www.averon.ru/service/>.

## Изготовитель:

ООО "ВЕГА-ПРО"

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,  
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1.

Адрес производства: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3.

бесплатный звонок по РФ: 88007001220.

тел.: +73433111121

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте [www.averon.ru](http://www.averon.ru).

## КОНТАКТЫ АВЕРОН

	<a href="http://averon.ru">averon.ru</a>		АВЕРОН зуботехникам
	8 800 700-12-20 Бесплатно на территории РФ		АВЕРОН – оборудование для зубных техников
	<a href="mailto:feedback@averon.ru">feedback@averon.ru</a>		АВЕРОН, зуботехническое оборудование

Следите за нашими новостями

