



ЕАЭС



**Лампа
для сушки
окрашиваемых изделий
из оксида циркония
ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.64778/23
от 13.02.2023

**Этикетка
АВЕ 638.000.000 ЭТ**

для CAD-CAM систем

Мобильное Приложение АВЕРОН:



для Huawei



для Android



для iOS



feedback@averon.ru

23-01

www.averon.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН (далее - ЛАМПА) серии ЛАМПА ЦИРКОН, предназначена для сушки окрашиваемых изделий из оксида циркония. АВЕ 27.90.11-069-52331864-2023 ТУ.

Предназначена для совместной работы с ЭМП 1.0 ЦИРКОН.

1.2 Особенности

- инфракрасная лампа **(1)** мощностью 250 Вт (далее ИК-лампа) с выключателем **(2)**;
- регулировка положения ИК-лампы по высоте, в диапазоне 60...110 мм от основания до колбы.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 1,2А
- мощность ИК-лампы 250 Вт
- габариты (ШхГхВ), не более 150×195×330 мм
- масса, не более 3 кг



3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН 1 шт.

Этикетка АВЕ 638.000.000 ЭТ 1 шт.

Поставка по дополнительной заявке

Сменная инфракрасная лампа ЛС 1.0 ЦИРКОН.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Перед началом эксплуатации отрегулировать лампу на высоту примерно 90 мм от основания, ослабив барашек **(3)** на задней стенке ЛАМПЫ. Переместить ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек.

ИК-лампу голыми руками не трогать во избежание преждевременного выхода её из строя, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.

• Промыть изделие под проточной водой для удаления пыли и поместить под ИК-лампу.

• Включить ЛАМПУ выключателем **(2)**. Просушить изделие не менее 20 мин.

• Высушенное изделие можно подвергать покраске (см. инструкцию на краситель).

• Окрашенное изделие поместить под ИК-лампу. Просушить до полного высыхания, но не менее 20 мин.



5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛАМПЫ от сети.

Замена ИК-лампы:

- ослабить барашек на задней стенке и опустить ИК-лампу в нижнее положение;
- выкрутить ИК-лампу из патрона против часовой стрелки;
- закрутить новую ИК-лампу в патрон. Здесь и далее ИК-лампу голыми руками не трогать, использовать чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.
- поднять ИК-лампу на нужную высоту и затянуть барашек на задней стенке.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛАМПЫ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛАМПЫ не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска Изготовителем, кроме инфракрасной лампы.

Гарантийный срок на ИК-лампу - 6 месяцев с даты продажи.

Установленный Изготовителем срок службы ИК-лампы - 6500 часов.

По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования Изделия по назначению, включая его безопасность.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:
<https://www.averon.ru/service/>.

Изготовитель:

ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,
тел.: +73433111121,

feedback@averon.ru

Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская обл., г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4

Бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте www.averon.ru.

КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		АВЕРОН зуботехникам
	8 800 700-12-20 бесплатно на территории РФ		АВЕРОН – оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		АВЕРОН, зуботехническое оборудование

Следите за нашими новостями

