



**ЕАС**



# СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СТУЛ 2.0 ФОЛК ПЛЮС



**Этикетка  
АВЕ 661.000.003 ЭТ**


Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ56.В.06187/20  
от 05.10.2020

## Мобильное Приложение АВЕРОН:

**для Android**



**для iOS**

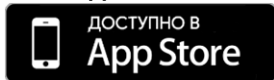

**для Huawei**



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника **СТУЛ 2.0 ФОЛК ПЛЮС** серия ФОЛК (далее – стул). ГОСТ 19917-2014.

1.2 Стул с эргономичным сидением предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника. Возможность дооснащения элементами системы хранения.

### 1.3 Особенности

- \* встроенная под сиденье полка для легкой обуви или других предметов;
- \* органайзер для упорядоченного хранения личных вещей, принадлежностей для работы, имеет 5 отделений и крепится на спинку сиденья;
- \* на боковых кронштейнах сиденья расположены гнезда с шагом 60 мм для навешивания карманов, держателей и подставок АВЕРОН.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более..... 80%

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты, не более ..... 560×560×810...920 мм
- высота сиденья над уровнем пола ..... 440...550 мм
- габариты сиденья..... 460×410 мм
- масса ..... 12 кг

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ


	ШТ
Сиденье (1) с кронштейном (2) .....	1
Каркас с колесными опорами .....	1
Полка (3) для обуви ПОЛКА 1.1 СТУЛ, в составе: .....	1
полка (а), стенка задняя (б), стенка боковая левая (в)/правая (г), полка верхняя (д)	
ОРГАНАЙЗЕР 1.0 ФОЛК (4) .....	1
Этикетка АВЕ 661.000.003 ЭТ	

Поставка по дополнительной заявке:

ДЕРЖАТЕЛЬ/ПОДСТАВКА

ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН


КАРМАН 1.0 ФОЛК - съемный карман

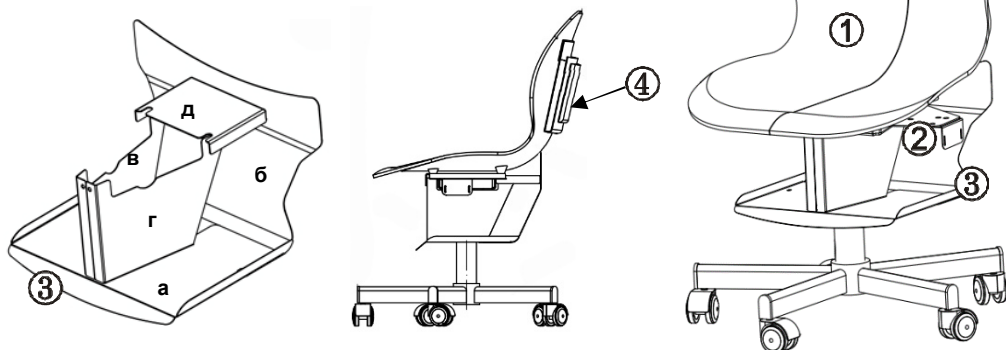



## 4 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.





- I Собрать каркас.  
Прикрепить колесные опоры.

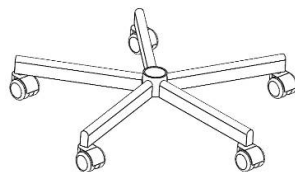

- II Установить кронштейн (2), основание сиденья с ручкой регулировки высоты, полку верхнюю (д) на сиденье. Установить уголок на кронштейн.

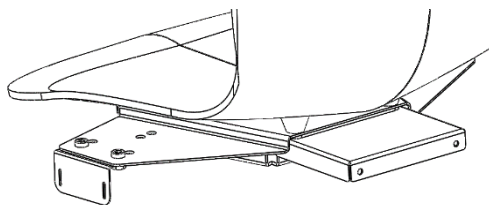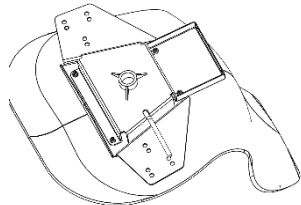

- III Установить сиденье с основанием, полку (3) на крестовину с пневмолифтом. Крепеж установлен по месту.

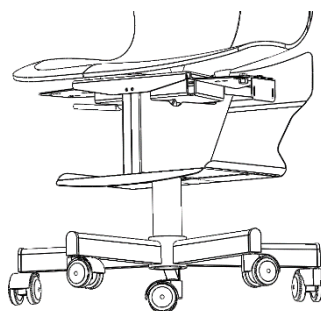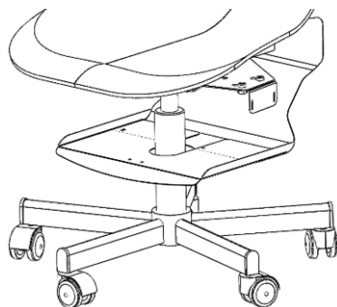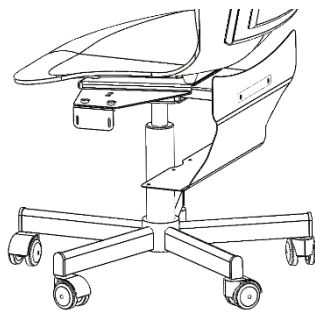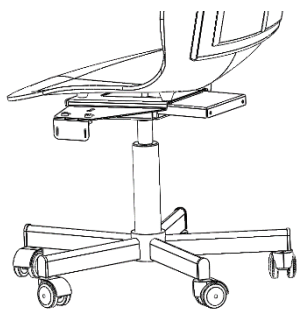

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки под сиденьем. При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в держателях и подставках (поставка по дополнительной заявке) не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

## 6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе стула не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) стула не требуется.

## 7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

**Изготовитель: ООО «ВЕГА-ПРО»**

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1.**

**Адрес производства: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3. [www.averon.ru](http://www.averon.ru).**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20,**

**тел. (343) 311-11-21, [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)**

**Сервис-центр: тел. бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>СТУЛ 2.0 ФОЛК ПЛЮС</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.