




УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРЕЗКИ ЛИТНИКОВ ПЛАТФОРМА 1.0 КАСТ

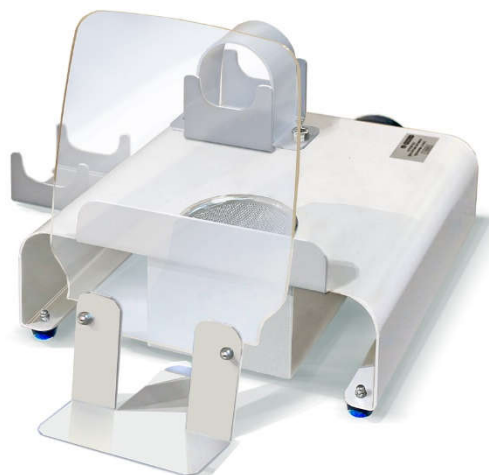


Этикетка
АВЕ 684.000.000 ЭТ

Мобильное Приложение АВЕРОН:

для Android



для iOS

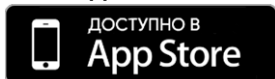

для Huawei



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПЛАТФОРМА 1.0 КАСТ (далее – платформа) предназначена для отрезки литников мини угловыми шлиф-машинами (далее – УШМ).

Мини-УШМ в комплект поставки не входит!

1.2 Условия эксплуатации

температура окружающая 10...35°С

влажность при 25°С, не более80 %

1.3 Основные технические характеристики

габариты, мм 220x250x235

масса, не более, кг 2,0

1.4 Особенности

- совместимость с аккумуляторными мини-УШМ моделей Bosch 12B GWS 12V-76, WORX WX801, Metabo PowerMaxx CC 12 V;
- возможны другие аналоги аккумуляторных УШМ с диаметром рабочего диска 76 мм;
- быстрая фиксация УШМ в рабочем гнезде платформы;
- компактная конструкция, простое обслуживание;
- встроенный в платформу вытяжной канал собирает отходы из-под инструмента;
- фильтр-сито удерживает обрезанную коронку от попадания в вытяжной канал;
- защитный экран обеспечивает безопасную работу.



1.5 Комплектность

Платформа ... - 1 шт

Фильтр-сито-1 шт

Основание - 1 шт

Экран защитный ... - 1 шт

Гнездо для УШМ-1 – 1 шт

Гнездо для УШМ-2 другой модификации – 1 шт

Прокладка на гнездо – 4 шт

Ключ шестигранник, S=4 мм

Этикетка ABE 684.000.000 ЭТ

Поставка по дополнительной заявке:

- Вытяжное устройство УПЗ-Бокс-01 «Аверон»

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- касание вращающихся элементов конструкции;
- работа без защитного экрана;
- работа поврежденными рабочими дисками.

3 УСТРОЙСТВО

- 1 - платформа
- 2 - защитный экран
- 3 – кронштейн для экрана
- 4 - фильтр-сито
- 5 – гнездо для УШМ-1
- 6 - хомут
- 7 – гнездо для УШМ-2 другой модификации
- 8 - втулка для подключения шланга УПЗ



4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

Установить платформу (1) на ровной, устойчивой, горизонтальной поверхности.

Закрепить на платформе гнездо (5) или (7) в зависимости от приобретенной мини-УШМ, установив прокладки на гнездо.

Установить фильтр-сито (4) в гнездо платформы.

Закрепить УШМ в гнезде (5/7) при помощи хомута (6).

Закрепить защитный экран (2) в кронштейне (3) и установить под платформу.

Подключить шланг УПЗ к втулке (8).

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Необходимо предварительно изучить сопроводительные документы мини-УШМ.

Включить УПЗ, затем мини-УШМ и обрезать литники, соблюдая особую осторожность, см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

После работы выключить УПЗ, УШМ.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, проводятся:

- протирка поверхности платформы и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой);
- очистка поверхности – при помощи УПЗ.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе платформы не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) платформы не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Производитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,

город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПЛАТФОРМА 1.0 КАСТ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик
Дата продажи _____	Продавец

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.