

# БОКС для выполнения работ по очистке изделий паром Б 1.0 СТИМ ПЛЮС

Этикетка  
АВЕ 318.000.001 ЭТ

## ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Средний срок службы - 5 лет. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Бокса для пескоструйных работ требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

Б 1.0 СТИМ ПЛЮС	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для **Б 1.0 СТИМ ПЛЮС** (далее – **БОКС**).

1.2 **БОКС** предназначен для организации мобильного рабочего места по очистке паром. Эксплуатируется совместно с пароструйным устройством (далее - УПС). Рекомендуются УПС ГЕЙЗЕР АРТ.

1.3 **БОКС** обеспечивает комфортное выполнение работ, а также сбор конденсата и отходов при очистке паром. Легко обслуживается.

### 1.4 Основные технические характеристики

• габариты, не более ..... 265×265×260 мм

• масса, не более ..... 1,9 кг

### 1.5 Комплектность

1 – Рабочий столик ..... – 1

2 – Емкость для сбора отходов ..... – 1

3 – Экран защитный ..... – 1

4 – Держатель паропистолета

ДЕРЖАТЕЛЬ 1.1 УПС ..... – 1


Салфетка сменная ..... – 5

Зажим для салфетки ..... – 10

Этикетка АВЕ 318.000.001 ЭТ

### Поставка по дополнительной заявке:

☒ - материал для сменных салфеток ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН

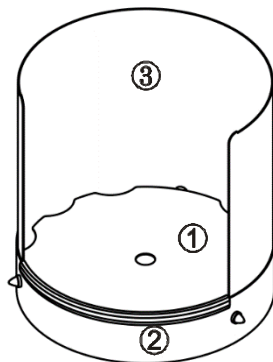

## 2 РАБОТА

Установить экран (3) в емкость (2) до упора. Силиконовый профиль на переднем ребре емкости - для опоры руки с обрабатываемым изделием.

Установить столик (1) на упоры емкости.

Для блокировки разбрызгивания грязи закрепить салфетку при помощи зажимов.

Разместить держатель (4) паропистолета на верхнюю кромку защитного экрана - магнитная фиксация. Для регулировки наклона в держателе выполнены соответствующие пазы для установки на экран под углом.

Разместить предметы для очистки (изделия, инструменты и т.д.) на столик (1).

Провести очистку паром согласно эксплуатационной документации на УПС.

По окончании работ очистить **БОКС**, для чего снять столик, используя, при необходимости, отверстие и слить конденсат с отходами из емкости.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, заменить салфетку, протереть поверхности корпуса:

- наружные от пыли - влажной мягкой тканью;
- внутренние - тканью, смоченной бензином “Галоша”.

При стойких загрязнениях – обработать **БОКС** паром.

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,

город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

8 800 700 11 02