



БОКС для выполнения работ по очистке изделий паром Б 1.0 СТИМ ПЛЮС



Этикетка
АВЕ 318.000.001 ЭТ

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,
город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Бокса для пескоструйных работ
требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

Б 1.0 СТИМ ПЛЮС	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для **Б 1.0 СТИМ ПЛЮС** (далее – БОКС).

1.2 БОКС предназначен для организации мобильного рабочего места по очистке паром. Эксплуатируется совместно с пароструйным устройством (далее - УПС). Рекомендуются УПС ГЕЙЗЕР НЬЮ.

1.3 Основные технические характеристики

- габариты, не более 265×265×260 мм
- масса, не более 1,9 кг

1.4 Комплектность

	шт
БОКС для работ по очистке паром (1)	1
Рабочий столик (2)	1
Держатель паропистолета (3)	1
Салфетка сменная.....	5
Зажим для салфетки.....	4
Этикетка АВЕ 318.000.001 ЭТ	

Поставка по дополнительной заявке:

- ☒ - материал для сменных салфеток ФИЛЬТР 1.0 РУЛОН

2 РАБОТА

Установите столик (2) на упоры емкости БОКСА (1).

Силиконовый профиль на переднем ребре - для опоры руки с обрабатываемым изделием.

Для блокировки разбрызгивания грязи закрепите салфетку на защитный экран при помощи зажимов.

Держатель (3) паропистолета составной: металлический кронштейн с зацепами и дополнительным крепежом (гайка-заклепка+барашковый винт) к экрану и пластиковая накладка в виде "ласточкин хвост", на которую надвигается паропистолет имеющейся "прорезью" в корпусе.

Разместите предметы для очистки (изделия, инструменты и т.д.) на столик (2).

Проведите очистку паром согласно эксплуатационной документации на УПС.

По окончании работ очистите БОКС, для чего снимите столик и слейте из емкости конденсат.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости, замените салфетку, протрите поверхности корпуса:

- наружные от пыли - влажной мягкой тканью;
- внутренние - тканью, смоченной бензином "Галоша".

При стойких загрязнениях – обработайте **БОКС** паром.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Средний срок службы - 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

