



УСТРОЙСТВО для ЛОКАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КУЛЕР 1.0 ОПОКА МИНИ

Декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.75313/23
от 10.05.2023




Этикетка
АВЕ 098.000.000 ЭТ

Мобильное Приложение АВЕРОН:



для Huawei

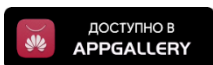

для Android



для iOS



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Устройство для локального охлаждения КУЛЕР 1.0 ОПОКА МИНИ серии КУЛЕР, АВЕ 28.25.11-065-52331864-2023 ТУ (далее - **КУЛЕР**) предназначено для ускоренного охлаждения опок.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Основные характеристики

максимальное количество опок Х9 6 шт
электропитание* ~220/230В 50/60Гц 0,15А
габариты (Ш×Г×В), не более 205×415×195 мм
масса, не более 3 кг

* - вставка плавкая ВП2Б-1В-1А-250- 1шт.

1.4 Комплектность

КУЛЕР - 1 шт.

Планка - 16 шт.

Этикетка АВЕ 098.000.000 ЭТ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка электропитания должна иметь контакт защитного заземления.


Не допускать попадания посторонних предметов в вентилятор.

Не касаться неостывших опок руками без средств защиты.

При длительных перерывах в работе выключать вилку шнура питания из розетки.

3 РАБОТА

Включить вилку сетевого шнура **КУЛЕРА (1)** в розетку ~220/230В 50/60Гц (см. Меры безопасности).

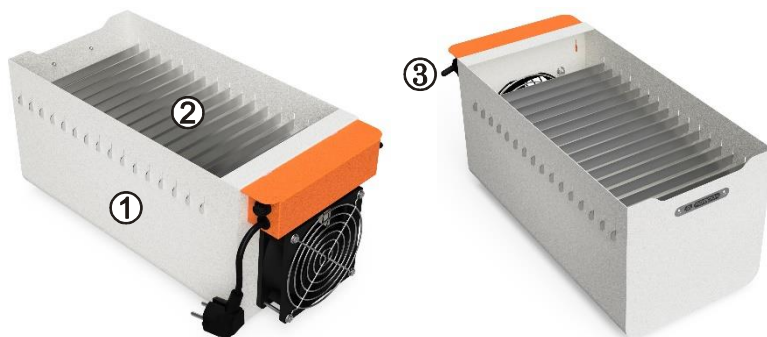

Разместить горячие опоки (максимальное количество – 6 шт.) на опорной решетчатой поверхности (2), состоящей из 16 планок. Расстояние между планками 20 мм для возможности установки опок Ø30 мм.

Включить питание тумблером (3).

После остывания опок отключить питание.

ВНИМАНИЕ!

Для максимальной эффективности работы **КУЛЕРА** заполнение короба горячими опоками следует производить с противоположной стороны от вентилятора.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **КУЛЕРА** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **КУЛЕРА** не требуется.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Средний срок службы - 3 года. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования Изделия по назначению, включая его безопасность.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности устройства.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель: О ОО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,

тел.: +73433111121

feedback@averon.ru

Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4

Бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Устройства для локального охлаждения требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

КУЛЕР 1.0 ОПОКА МИНИ	зав.№
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		АВЕРОН зуботехникам
	8 800 700-12-20 бесплатно на территории РФ		АВЕРОН – оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		АВЕРОН, зуботехническое оборудование

Следите за нашими новостями 

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:
<https://www.averon.ru/service/>.

Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте
www.averon.ru.