



EAC



ОТДЕЛИТЕЛЬ ГИПСА ПРОТОЧНЫЙ (ГИПСООТСТОЙНИК) серия ОГП



Этикетка
АВЕ 454.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.55293/23 от 20.03.2023

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,
тел.: +73433111121

feedback@averon.ru

Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская обл.,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4
Бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ОГП	2.0 МИНИ
Заводской номер	
Дата выпуска	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата продажи	Продавец

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

feedback@averon.ru

24-01

www.averon.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ


1.1 Отделитель гипса проточный серия ОГП (далее - **ОГП**) предназначен для разделения смеси, поступающей из мойки, на воду, сливаемую в канализацию, а также песок и гипс, собираемые для последующей утилизации. АВЕ 28.29.12-041-52331864-2022 ТУ.

1.2 Основные характеристики

- диаметр/высота корпуса..... - 330/265 мм
- масса, не более - 1,8 кг
- диаметр вход/выход. патрубков - 40 мм
- емкость (наружный контейнер)..... - 15 л
- емкость (внутренний контейнер)..... - 7 л

1.3 Комплектность

- | | |
|---|-----------|
| | шт |
| • контейнер-мини 1-го уровня (1)..... | - 1 |
| • крышка ОГП-мини (3)..... | - 1 |
| • емкость (2) п/э с ручкой
и герметичной крышкой, 7 л..... | - 1 |
| • выходной шланг (5)
для соединения с канализацией..... | - 1 |

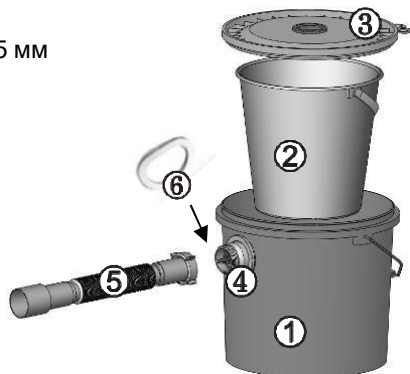

поставка по дополнительной заявке:

- КРЫШКА 2.0 ОГП МИНИ КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП МИНИ

2 УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Контейнер (1) и емкость (2) без крышки образуют 2 секции отстойника с различным уровнем заполнения и протяженным переливом.

Подключите **ОГП** между мойкой и канализацией, для чего соедините:

- сливную трубу мойки с **ОГП** через манжету крышки (3). Для блокировки неприятных запахов допускается соединить мойку с **ОГП** через шланг, подобный шлангу (5) - гидрозатвор, но при этом в перегибе может возникать засор (для устранения, не разбирая систему, пошевелите шланг в районе изгиба);

- один конец шланга (5) со сливным патрубком (4) через уплотнительную прокладку (6);

- другой конец шланга (5) со сливом канализации. Слив канализации должен быть ниже патрубка (4) и шланга (5). При необходимости, можно установить **ОГП** на подставку.

ОГП не задерживает выплавленный воск. При вымывании воска из кювет в ту же раковину – используйте АМФ 1.0 ВОСК. Использование ОГП без АМФ 1.0 ВОСК приводит к быстрому засорению сливного патрубка ОГП.

ВНИМАНИЕ!

Надевать крышку на емкость (2) **только** для транспортировки отходов при чистке!
Крышку на корпусе закрывать до щелчка!

РЕКОМЕНДАЦИИ

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно, после завершения работ, пролить через мойку-**ОГП** не менее 5 л воды. По мере заполнения очищать **ОГП** - вынуть емкость и удалить отходы. Рекомендуется под **ОГП** установить поддон для сбора капель при вскрытии/расстыковке во время обслуживания.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на пластиковую емкость (2).

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.