



EAC



СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СТУЛ 1.1 МАСТЕР



Этикетка
АВЕ 484.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.25587/20 от 29.04.2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СТУЛ 1.1 МАСТЕР	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника **СТУЛ 1.1 МАСТЕР** (далее – стул). ТО 31.09.11-039-52331864-2020.

1.2 Стул предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- габариты, не более 630×600×920 мм
- ширина сиденья 440 мм
- глубина сиденья 400 мм
- высота сиденья 500-570 мм
- максимальная нагрузка 110 кг
- масса, не более 8,5 кг


1.5 Особенности

- компактный, мобильный – легко перемещается на колесах;
- встроенный тренажер для выполнения упражнений, снимающих утомление;
- на задней стенке карманы, позволяющие убирать лишние вещи из рабочей зоны;
- ручки эспандера можно убрать в нижний задний карман или повесить на зацепы.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

шт



- 1 – сиденье со спинкой - 1
 - 2 – крестовина - 1
 - 3 – колесная опора - 5
 - 4 – пневмолифт
 - с регулировочной ручкой (5) - 1
 - 6 – эспандер с хомутами -1
 - 8 – опорная площадка -1
- Этикетка АВЕ 484.000.000 ЭТ

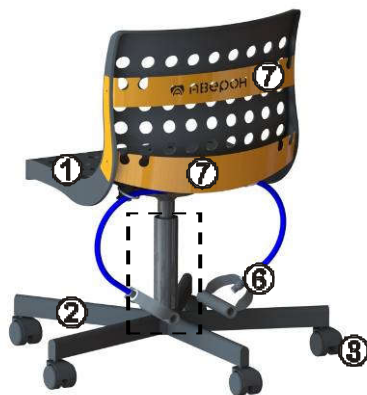


3 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

- I Собрать крестовину: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. Прикрепить колесные опоры к крестовине.

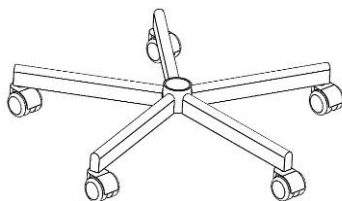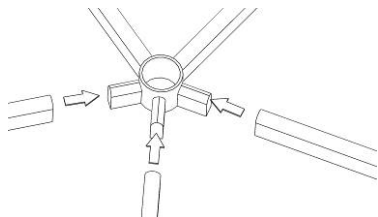

- II Прикрепить пневмолифт, установив его основание в отверстие крестовины

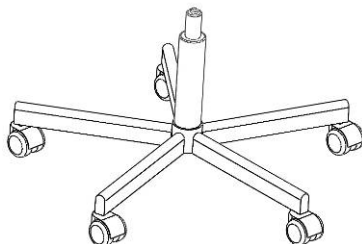

III

УСТАНОВИТЬ

- эспандер (6) снизу сиденья и зафиксировать хомутами вокруг задних выступов крепления опорной площадки (8), рис.а;
- опорную площадку (8) на четырех выступах снизу сиденья, рис.б;
- сиденье на крестовину с пневмолифтом.

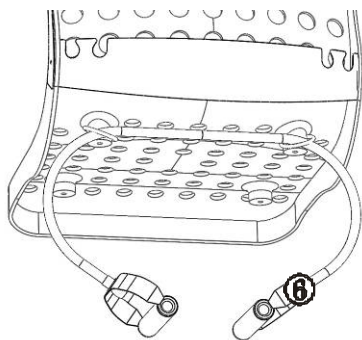


рис.а

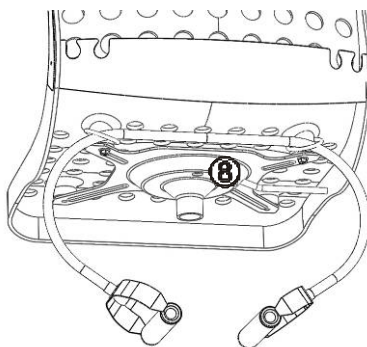


рис.б

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки пневмолифта.

При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в карманах (7) не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

Для снятия утомления при длительных работах рекомендуется выполнить комплекс разминочных упражнений.

Видеокурс с упражнениями, разработанными специально для выполнения на СТУЛ 1.x МАСТЕР, смотрите на странице «Рабочие места и принадлежности/Столы зубного техника/СТУЛ 1.1 МАСТЕР» (вкладка «Видео») на сайте www.averon.ru.



ВНИМАНИЕ!

Соблюдать осторожность при пользовании эспандером – следить за исправностью, не прилагать излишних усилий во избежание травм.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru