




ЕАС



МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серия ВМУ

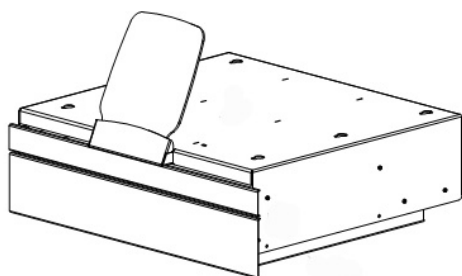

**Этикетка
АВЕ 365.000.001 ЭТ**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.ХЦ01.В.02138/20 от 29.06.2020


ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>

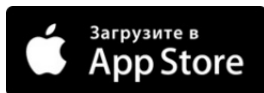

Приложение ПРАЙС АВЕРОН
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального серия ВМУ (далее – Модуль). ТУ 4863-047-52331864-2015. Предназначен для работы с внешней вытяжкой.

1.2 Особенности

- Модуль выполнен из металла и предназначен для комплектования столов при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.
- Воздушный канал подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее - УПЗ.
- Быстросъемный экран с магнитной фиксацией предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- габариты 495×440×175 мм
- масса, не более 9,6 кг
- диаметр подсоединяемого шланга .45 мм
- крепление к столешнице толщиной 20...50 мм
- максимальная нагрузка на направляющие ящиков 5 кг

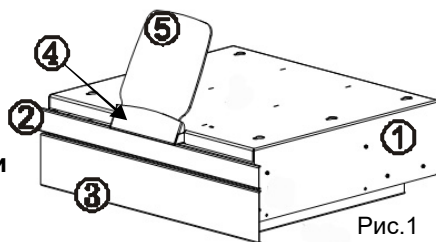


Рис.1

1.5 Комплектность (рис.1-4) шт

1 — Рама	- 1
2 — Ящик верхний	- 1
3 — Ящик нижний	- 1
4 — Платформа выдвигаемая	- 1
5 — Экран защитный ЩИТ 1.1 АРТ - 1	
6 — Втулка сопряжения.....	- 1
Саморез с пр-ш 4,2×19	- 8
Этикетка в комплект	
ABE 365.000.001 ЭТК	

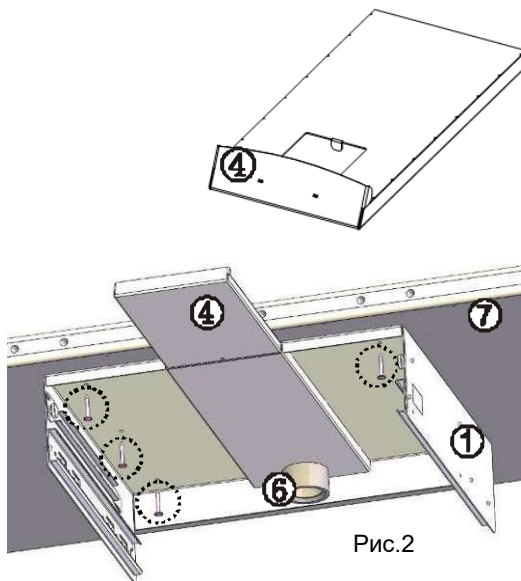


Рис.2

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

2.2 Порядок сборки (рис. 1-4)

- вынуть из рамы (1) платформу (4) и ящик верхний (2);
- выдвинуть полностью нижний ящик (3) и снять его с направляющих, нажав на пластиковые рычажки в направляющих. При снятии ящика не допускать рывки и перекосы.



Рис.3

- закрепить раму снизу столешницы (7) СУЛ/СЗТ 4.х АБЕРОН (деревянной или из постформинга) саморезами из комплекта; на СЗТ 4.3 МАСТЕР (металлическая столешница) – крепление винтами, установленными по месту (см. разметку на обратной стороне столешницы);
- подсоединить входной шланг УПЗ в втулке (6) на направляющей платформе;
- установить оба ящика в раму;

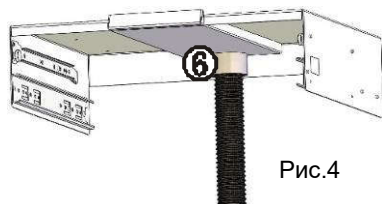


Рис.4

Удобней - из положения сидя, удерживая на весу ящик, завести правую и левую части направляющих в ответные, предварительно вытянув их вперед. В начале движения в направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора. Затем с одновременным надавливанием на края фасада вкатить ящик по направляющим до конца.

- распаковать экран (5), снять с него защитную пленку и установить на корпусе ВМУ между боковыми оттибами. Закрепить магнитами на передней наклонной стенке.

Возможна установка гибкого защитного экрана ЩИТ 3.0 ФЛЕКС (поставка по дополнительной заявке).

До задвигания платформы (4), экран вынуть и уложить на столешнице рабочего стола, или в другом удобном месте.

ВНИМАНИЕ!

Не оказывать значительное давление на выдвижную платформу во избежание ее деформации и заклинивания.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистить воздуховод, выдвижную платформу от производственных отходов при помощи внешней вытяжки;
- протереть внутренние, наружные поверхности и экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru







бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

КОНТАКТЫ АВЕРОН			
	averon.ru		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		instagram.com/ averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!