



# ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



**модель  
ЗОНТ 11.1 ЭМП**

**Этикетка  
АВЕ 540.000.000 ЭТ**

**Изготовитель:**

**ООО "ВЕГА-ПРО"**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**Юр. адрес:** Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город  
Екатеринбург,

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,

тел.: +73433111121

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Адрес производства:** Россия, 620902, Свердловская обл., г.о. город  
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4

**Бесплатный звонок по РФ:**

**88007001220**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**88007001102**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической  
документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>модель ЗОНТ 11.1 ЭМП</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**24-01**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1** Зонт вытяжной ЗОНТ 11.1 ЭМП (далее – ЗОНТ), предназначен для совместной работы с Электропечью муфельной ЭМП 11.1 (НБЮ) (далее - ЭМП), устанавливается на ее корпус и обеспечивает эффективное удаление газов, выделяемых при работе с литейными формами на ЭМП.

### 1.2 Особенности

- локализация и отвод газов, выделяемых при эксплуатации;
- фиксирование на ЭМП и снятие без инструмента.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты (ШхГхВ), не более..... 260×275×130 мм
- масса, не более..... 1 кг

### 2.3 Комплектность

корпус (1)	1 шт.,
фланец ВЕНТС ФМ 100 (2)	1 шт.,
саморез п-круг. 3,5х 9,5	4 шт.,
Этикетка АВЕ 540.000.000 ЭТ	1 шт.

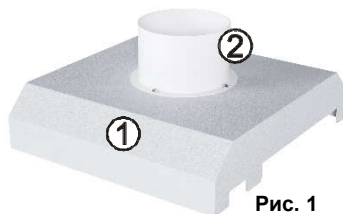


Рис. 1

## 3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- распаковать ЗОНТ. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику;
- отсоединить фланец (2), установленный изнутри ЗОНТа (транспортировочное положение);
- установить фланец (2) как показано на рис.1 при помощи саморезов;
- установить конструкцию на ЭМП (рис. 2);
- к фланцу (2) подсоединить внешнюю вытяжку\*.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:

<https://www.averon.ru/service/>.



Рис. 2

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.