




EAC



СТОЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СЗТ 4.3 МАСТЕР ЮНГА

**Руководство по эксплуатации
АВЕ 013.000.000 РЭ**

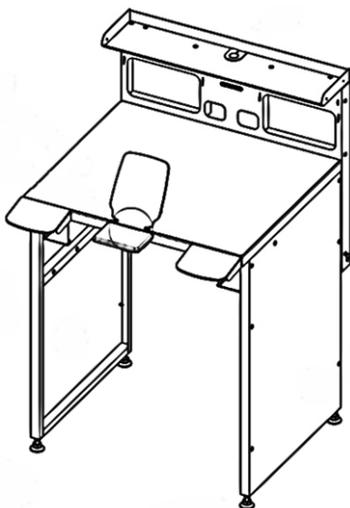

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.11437/22 от 08.06.2022

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СЗТ 4.3 МАСТЕР ЮНГА	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Стол зубного техника (далее – **СЗТ**). АВЕ 31.09.11-039-52331864-2022 ТО.

1.2 **СЗТ** предназначен для оснащения индивидуального рабочего места зубного техника и может использоваться в зуботехнических и литейных лабораториях стоматологических учреждений.

1.3 Особенности

- столешница с износостойким съёмным полимерным покрытием;
- вытяжной зонт встроен в столешницу и обеспечивает удаление отходов из-под инструмента;
- защитный экран с магнитной фиксацией;
- финагель с держателем защитного экрана;
- эргономичные подлокотники с войлочными накладками способствуют поддержанию чистоты на рабочем месте – улавливают сухие отходы, легко очищаются;
- многофункциональная задняя стенка, карманы с цветными наклейками;
- правый и левый карманы под столешницей системы хранения;
- полностью металлическое исполнение;
- подготовка для быстрой установки оборудования и дополнительных элементов:
 - вытяжная система АВЕРОН, от бюджетной до премиум;
 - светильники серий ЛЮКС 1.х и ЛЮКС 3.х;
 - система хранения ВЕРТИКАЛЬ, выдвижные ящики КОМПЛЕКТ 2.2;
 - комплект для поддержания чистоты и порядка РАМКА 1.0 ТРЭШ, ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 РУЛОН.

1.4 По дополнительной заявке (☒) можно доукомплектовать:

- светильником ЛЮКС НЬЮ/ЛЕД, ЛЮКС ЛИНЗА;
- многофункциональным стулом зубного техника СТУЛ 2.0 ФОЛК;
- ПОЛКОЙ БРИДЖ/КОНЕР/ЭВП/ЛОКАЛ, ПРИСТРОЙ СТОЛ, ПАНЕЛЬЮ БРИДЖ/БИГ/СЗТ, СТЕЛЛАЖОМ МАСТЕР для эффективного использования пространства отдельно взятого стола, а также между двумя и более **СЗТ**;
- подкатной тумбой ТУМБА 1.2;
- вытяжным модулем ВМУ 3.х БАЗИС;
- модулем с выдвижными ящиками КОМПЛЕКТ 2.2;
- автономным фильтр-циклоном АФЦ НЬЮ;
- бормашиной БМ ЭКО ПРОФИ/ОПТИМУМ с внешним пультом для управления подключенными к блоку наконечником бормашины и вытяжкой, а также подачи электропитания на используемые с **СЗТ** устройства.

Подробная информация о дополнительных устройствах и принадлежностях – в соответствующих подразделах раздела «Столы, светильники, вытяжки» Каталога оборудования на сайте www.averon.ru.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- габариты, не более 710×770×1125 мм
- столешница:
ширина/глубина/высота над уровнем пола, не более 700/600/850 мм
- масса, не более.....29 кг
- максимальная нагрузка на столешницу 120 кг

2.3 Комплектность согласно УПАКОВОЧНОМУ ЛИСТУ АВЕ 013.000.000 Д2.

3 УСТРОЙСТВО

- 1 – столешница с настольным покрытием и фильтр-ситом
- 2/3 – стенка боковая левая/ правая
- 4 – задняя многофункциональная стенка
- 5 – полка верхняя
- 6 – держатель экрана
- 7 – финагель
- 8/9 – подлокотники левый/правый
- 10 – карман задней стенки
- 11 – экран защитный магнитный
- 12 – втулка



Покрытие закреплено на столешнице и защищает ее поверхность от повреждений, например, абразивом при работе с бормашиной.

Пазы в торцах задней стенки у нижних углов - для прокладки проводов при соединении нескольких столов.



Для установки светильника удалить пластиковую заглушку в отверстии верхней полки (5).

Карманы под столешницу поставляются в разобранном виде, см. далее Инструкцию по сборке.


4 ПОРЯДОК СБОРКИ

См. Инструкцию по сборке АВЕ 013.000.000 ИЗ.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Допускается разнотон в разных партиях изделий, что не является дефектом.

5 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

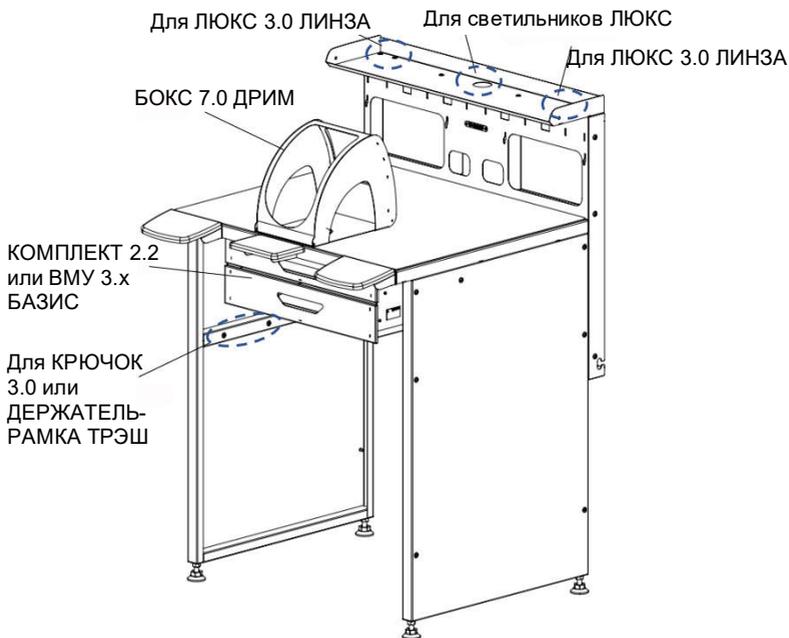

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку поверхностей **СЗТ** проводить влажной мягкой тканью (губкой), смоченной в слабом мыльном растворе, при отключенной вилке блока электропитания от сетевой розетки.

Для эффективного удаления сухих отходов с войлочных накладок используйте внешнюю вытяжку или ШГВ 1.2 КЛИНИНГ – устройство для уборки рабочего места, поставка по дополнительной заявке.

При сильном загрязнении настольное покрытие **СЗТ** заменяется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на защитный экран, войлочные накладки и лакокрасочное покрытие деталей из-за нормального износа при предусмотренном использовании. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,

город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

8 800 700 11 02