

ИНСТРУКЦИЯ



По применению мультифункционального раствора для мягких контактных линз

Показания к применению: Может использоваться для очистки, ополаскивания, дезинфекции, удаления биологических отложений и других загрязнений, увлажнения и хранения контактных линз.

Инструкция по применению: Откройте флакон, повернув пробку против часовой стрелки для вскрытия герметизирующего клапана. Всегда мойте и вытирайте руки чистым полотенцем перед тем, как прикоснуться к линзам. Всегда начинайте с одной и той же линзы, чтобы не перепутать их. Снимите линзу и сразу тщательно промойте ее раствором с обеих сторон в течение 10 секунд. Поместите линзу в контейнер, наполните его раствором и закройте контейнер крышечкой с соответствующей линзе меткой. Повторите процедуру со второй линзой.

Встряхивайте контейнер с линзами минимум в течение 15 секунд. Оставьте линзы в растворе минимум на 6 часов для дезинфекции. После дезинфекции сполосните обе стороны линзы свежим раствором. Теперь чистые, дезинфицированные линзы могут быть надеты прямо на глаза. Вылейте раствор из контейнера и сполосните его раствором. Сушите контейнер в открытом виде.

Если линзы хранились в контейнере с раствором более 30 дней, перед надеванием необходимо вылить раствор из контейнера и повторить все этапы ухода.

Меры предосторожности: Проверьте сохранность упаковки перед первым использованием. Если герметизирующий клапан поврежден, воздержитесь от использования раствора. Не прикасайтесь ничем к кончику открытого флакона, во избежание загрязнения. Всегда плотно закрывайте флакон после каждого применения. Используйте открытый флакон не дольше 90 дней (3 месяца). Не используйте раствор с истекшим сроком годности (указан на флаконе). Храните при температуре от +5° до +25° С.

Предупреждения: Храните в недоступном для детей месте. Никогда не смешивайте раствор с другими жидкостями и системами ухода за контактными линзами. Консультируйтесь со своим врачом при использовании любых лекарств, если вы носите контактные линзы. Никогда не используйте водопроводную воду для ухода за линзами.

Побочные реакции: В случае возникновения дискомфорта или раздражения, снимите линзы, прекратите пользоваться раствором и обратитесь к врачу.

Состав: Хлорид натрия, борная кислота, динатрийфосфат (или гидрофосфат натрия), хлорид калия, полоксамер, ЭДТА (0,05%), полигексаметиленбигуанид 0,00018% (PHMB), гидроксипропилметилцеллюлоза (HPMC), гиалуронат натрия, пропиленгликоль.

Срок годности: 3 года, при условии целостности упаковки и соблюдении правил хранения.

Многофункциональный раствор Horigen для хранения и очистки контактных линз. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07550 от 02.08.2010г. Обязательной сертификации не подлежит.

Производитель: «Хайчанг Контакт Ленз Ко., Лтд», Haichang Contact Lens Co., Ltd., №1, Danfu Road, Situ Town, Danyang City at City Zhenjiang, Jiangsu, China. P.C. 212331

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Оптиксервис», Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д.77, 5 этаж, тел.: +7 (383) 335-71-61.