



**пикассо**

Независимые  
центры рентгено-  
диагностики

# КАК ЗАПУСТИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ROMEXIS VIEWER С ДИСКА

[picasso-diagnostic.ru](http://picasso-diagnostic.ru)

# СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Рекомендуемые системные требования:

- ✓ Операционная система: Windows 7 и новее (64бит) или MacOS X Sierra и новее
- ✓ Процессор: Intel Core i5 и лучше
- ✓ Видеокарта: дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше
- ✓ Оперативная память: 8Гб и больше
- ✓ Разрешение экрана: 1920x1080 и выше
- ✓ Не менее 3Гб свободного места на системном диске

### *Обратите внимание!*

*Ваш компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям для работы программного обеспечения Rotexis Viewer, которое используется для просмотра исследования.*


Программное обеспечение Planmeca - Romexis Viewer не требует предварительной установки.

Для запуска программного обеспечения необходимо выполнить следующие шаги:

1. Вставить диск в дисковод компьютера.
2. Дождаться автозапуска, и выбрать «Запустить RomexisViewer».

Если это не произошло, то необходимо зайти в «Мой компьютер» → «DVD дисковод» → щелкнуть правой кнопкой мыши → в контекстном меню выбрать пункт «Открыть».

3. Запустить Romexis\_Viewer\_Win.exe для операционной системы Windows или Romexis\_Viewer\_OS\_X.app для компьютеров под управлением MacOS.

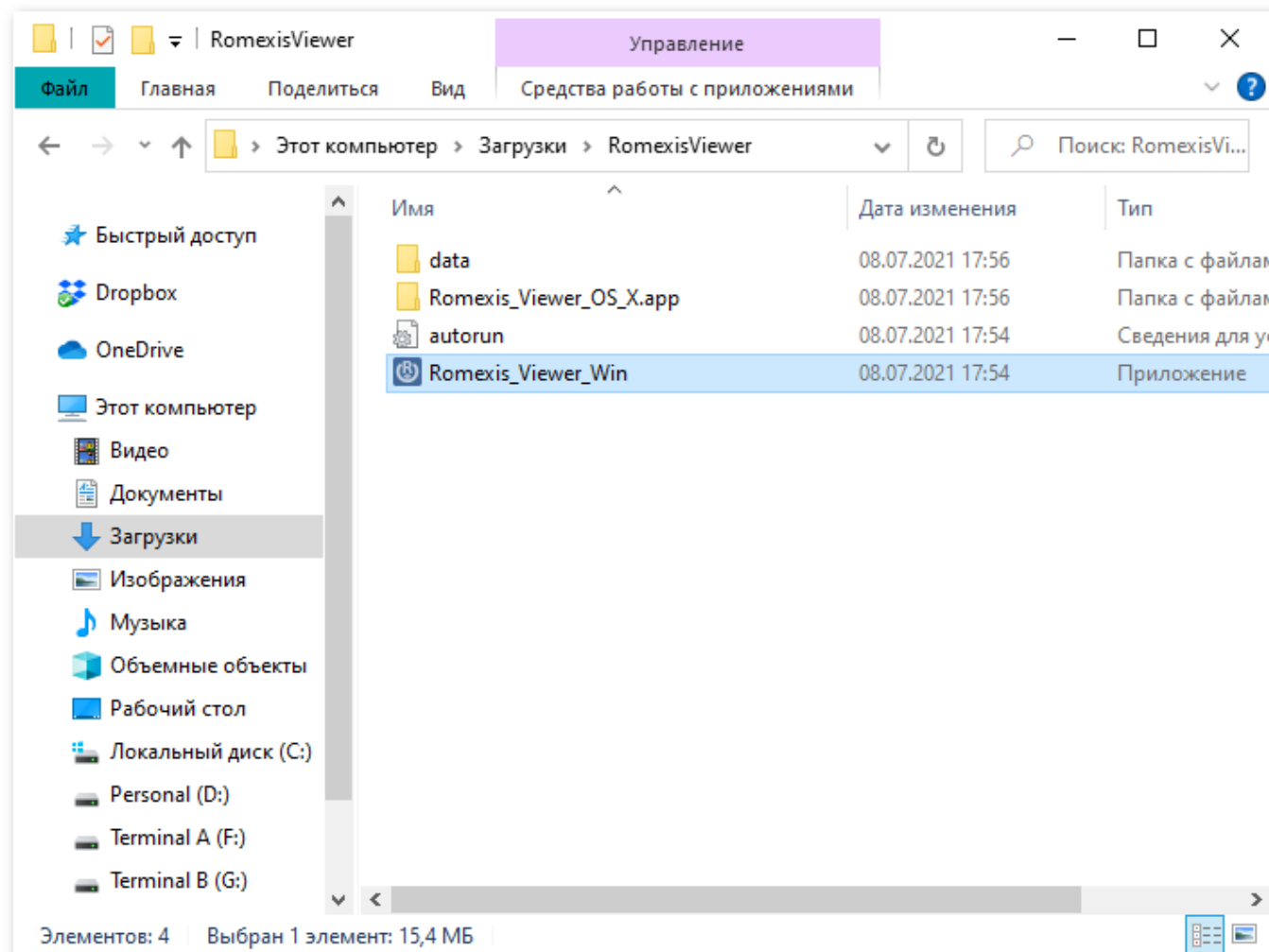



## ШАГ 2

4. После запуска приложения необходимо нажать «Запустить Viewer».

Пациент	Дата	Тип
✓ [Patient Name]	19.11.2020	3D КЛКТ

Переместите файл изображения или папку или нажмите кнопку

(De)select all patients      Добавить снимки

Установить      **Запустить Viewer**

www.planmeca.com



# ШАГ 3

5. На данном этапе нужно дважды щелкнуть мышкой на указанной строке. После этого произойдет загрузка исследования.

