



пикассо

Независимые
центры рентгено-
диагностики

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PICASSO VIEWER С DVD ДИСКА

picasso-diagnostic.ru



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуемые системные требования:

- ✓ Процессор: Intel Core i5 или лучше;
- ✓ Оперативная память: DDR 3 8Гб и больше;
- ✓ Не менее 5Gb свободного места на жестком диске;
- ✓ DVD-привод;
- ✓ Монитор с разрешением 1920x1080 или выше;
- ✓ Операционная система Windows 7, 8, 10 (x64);
- ✓ Видео карта дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше;
- ✓ При первичной установке требуются права администратора.

Минимальные системные требования:

- ✓ Процессор: Intel Pentium G серии 2,60 GHz и лучше;
- ✓ Оперативная память: DDR 3 4Гб и больше;
- ✓ Не менее 3Гб свободного места на системном диске;
- ✓ DVD-привод;
- ✓ Монитор с разрешением 1280x1024 (или выше) и глубиной цвета 32 бита;
- ✓ Операционная система: Windows 7 и новее (x86/x64);
- ✓ Интегрированная или дискретная видеокарта;
- ✓ При первичной установке требуются права администратора.

Обратите внимание!

Ваш компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям для работы программного обеспечения PicassoViewer, которое используется для просмотра исследования.


Для установки ПО Picasso Viewer, вам требуется:

1. Вставить диск в дисковод компьютера

2. Дождаться автозапуска, и выбрать
«Запустить Picasso Viewer».


Если это не произошло, то необходимо зайти в
«Мой компьютер» → «DVD дисковод» →
щелкнуть правой кнопкой мыши →
в контекстном меню выбрать пункт «Открыть».

3. Для установки, запустить файл «installer.exe»

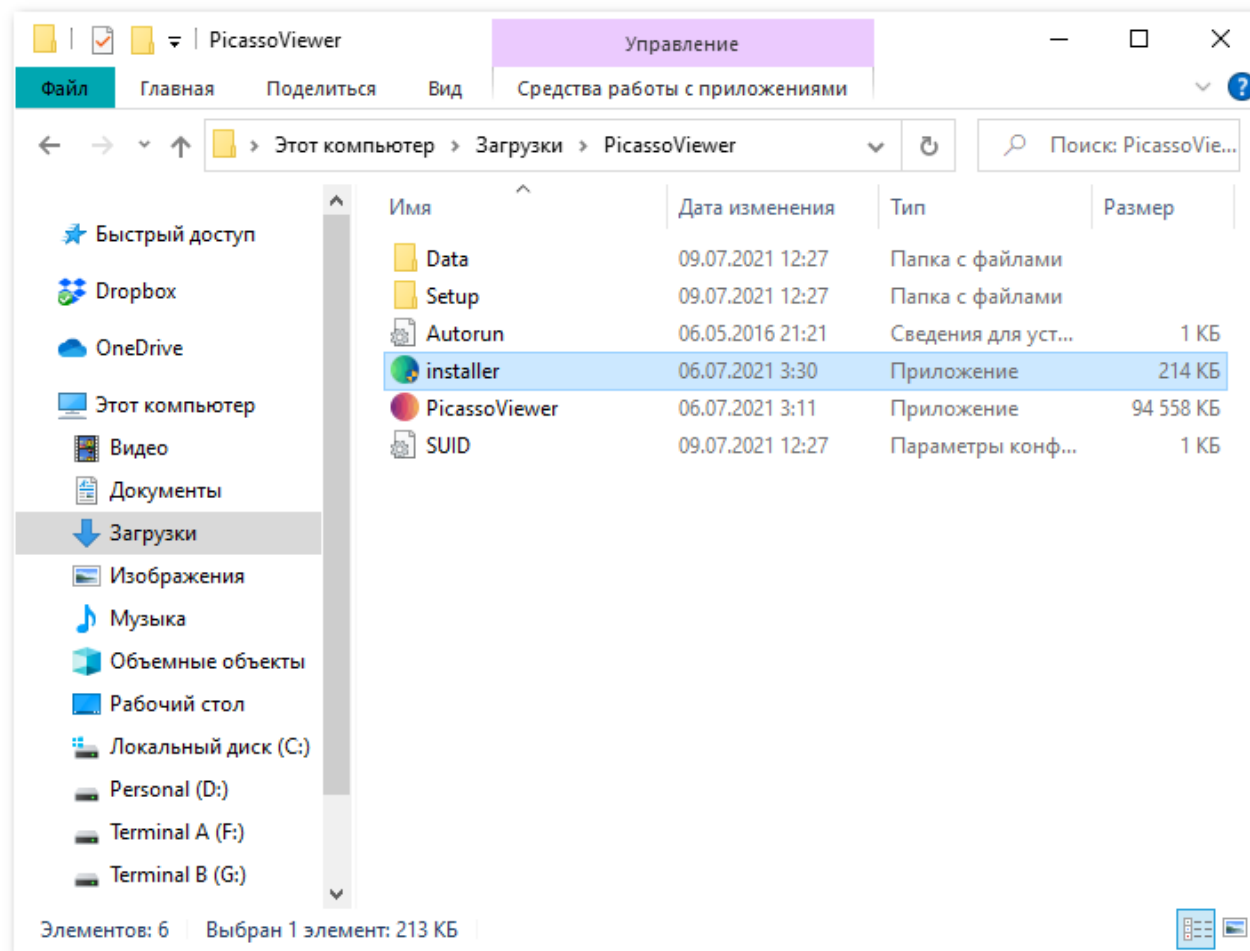




4. Нажимаем кнопку «Далее»

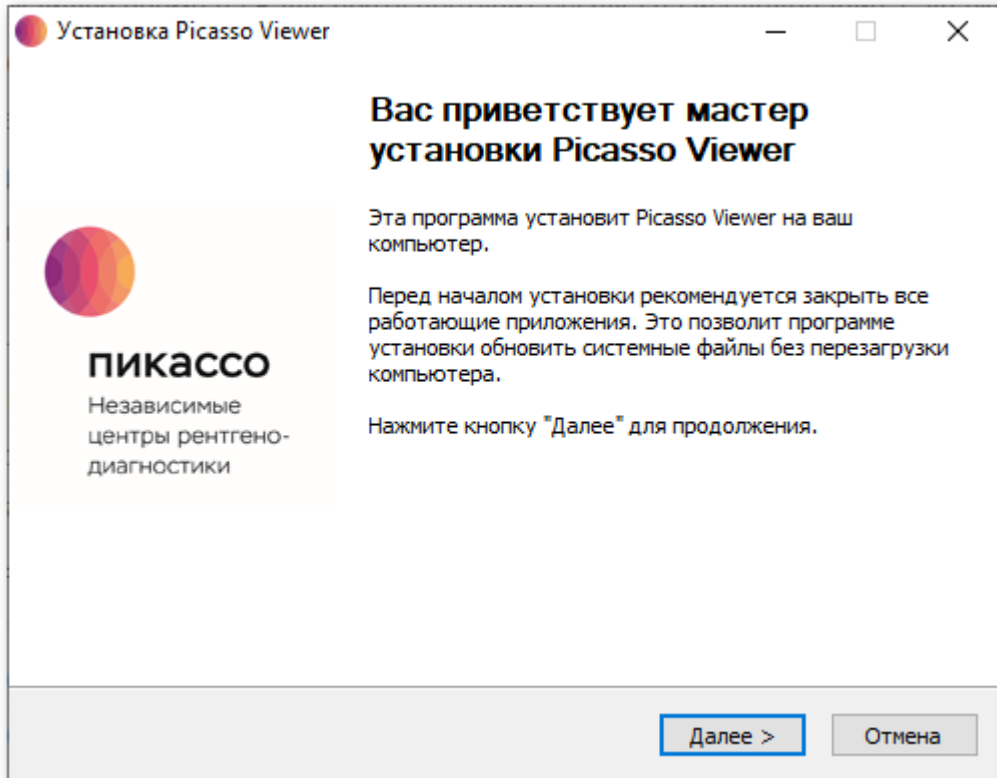


5. Необходимо принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее»

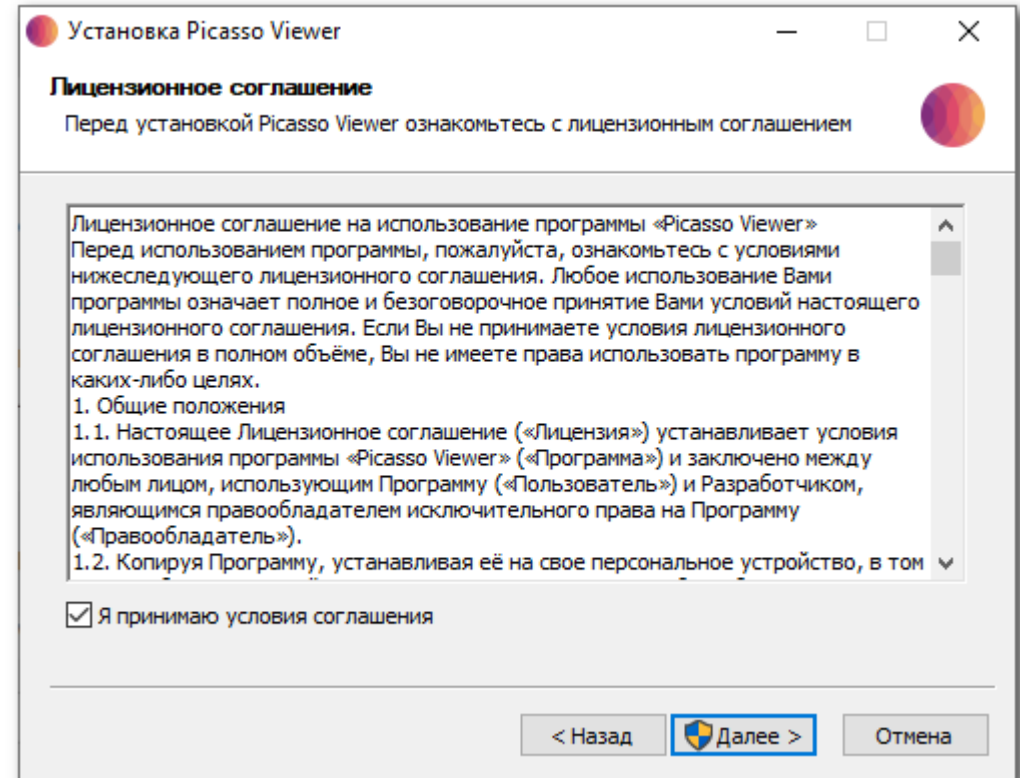




6. Дожидаемся окончания установки программы.

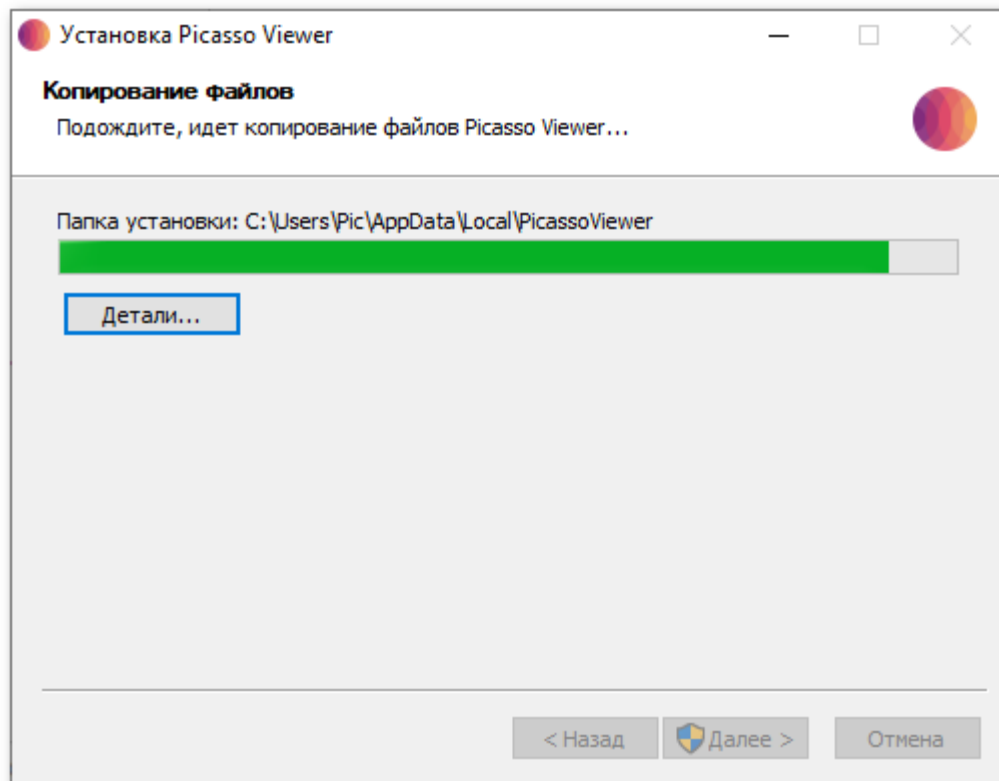

7. После окончания установки необходимых файлов нажимаем кнопку «Готово»

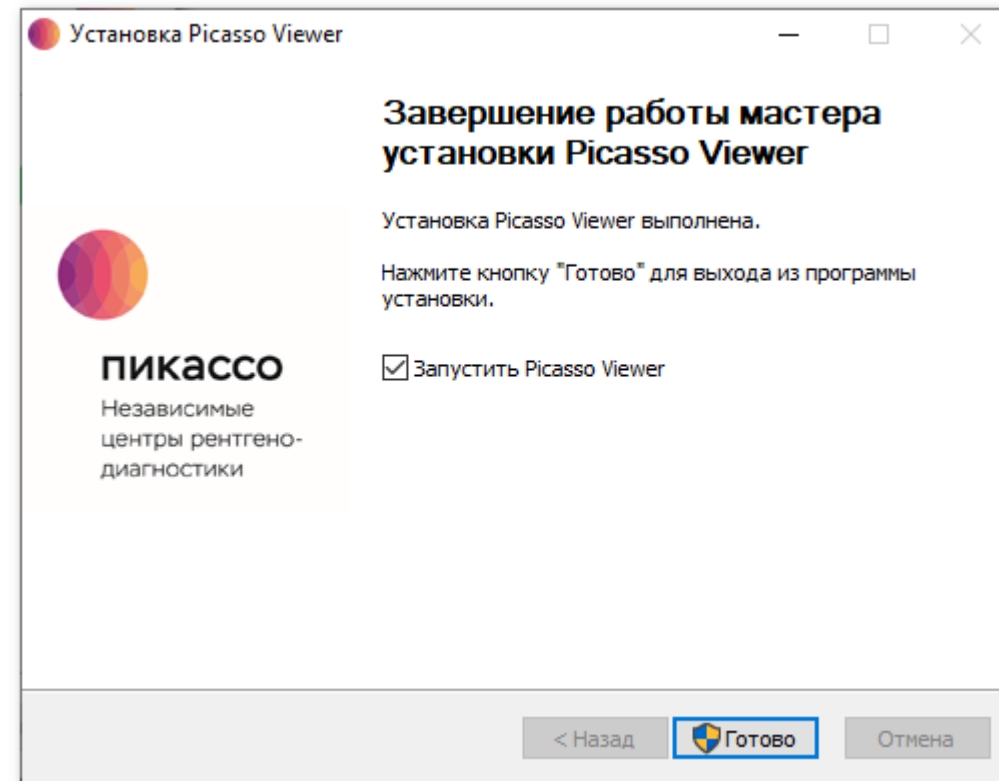



8. Для открытия исследования, наведите курсор мыши на исследование и нажмите «Перенести и открыть»

